



NÉBULISEUR À PATIENT UNIQUE

- Temps de nébulisation faible – 2,5 ml en 6 à 7 minutes
- Dépôt élevé de médicaments – 80% moins de 5 microns
- Performance reproductible – garantie d'efficacité
- Volume résiduel faible – 0,64 ml
- Effet "Turbo" grâce à sa double cheminée


Sidestream



Sidestream

Mode de fonctionnement

- 1 L'air comprimé arrive par le gicleur (jet) pour rentrer en contact avec la barre de fractionnement et se scinder en deux flux haute vitesse.
- 2 Sous l'effet de ces flux, le médicament est aspiré sous forme de film liquide pour être vaporisé.
- 3 La cuve, de conception révolutionnaire permet d'ajouter au flux d'air initial un flux périphérique complémentaire (effet turbo). La combinaison de ces flux permet avec un débit de 6 litres d'avoir les performances d'un débit de 16 litres! Les particules supérieures à 5 microns sont sélectionnées par le déflecteur pour être retraitées.
- 4 Les particules inférieures à 5 microns continuent vers les poumons des patients.
- 5 le flux périphérique complémentaire vient augmenter les performances.

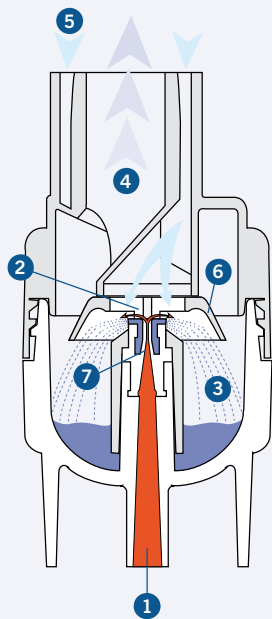


- 6 Déflecteur de sélection des particules : performances reproductibles.
- 7 Gicleur (jet).

MÉDICAMENTS/ DRUGS	MMD en μ à 4 l/min	MMD en μ à 6 l/min (Portaneb Lite)	MMD en μ à 7 l/min (Porta- neb)*	MMD en μ à 8 l/min
PULMICORT	5.58	4.18	3.83	3.48
VENTOLINE	4.47	3.39	3.15	2.92
COLIMYCINE	4.72	3.75	3.40	3.07
BRICANYL	5.47	3.98	3.60	3.22
MUCOMYST	3.55	2.99	2.75	2.50
TOBI (TOBRAMYCINE)	4.62	3.56	3.27	2.97
ATROVENT	5.31	3.67	3.39	3.11
XYLOCAINE	4.52	3.62	3.29	2.95
AROMASOL	4.07	3.04	2.74	2.44
GOMENOL	5.49	4.06	3.70	3.35
LOMUDAL	5.08	3.95	3.67	3.40

*les données à 7ltrs indiquées ci-dessus, ont été déduites par extrapolation.


Respironics référence: AS0516-F1027-100608-AH

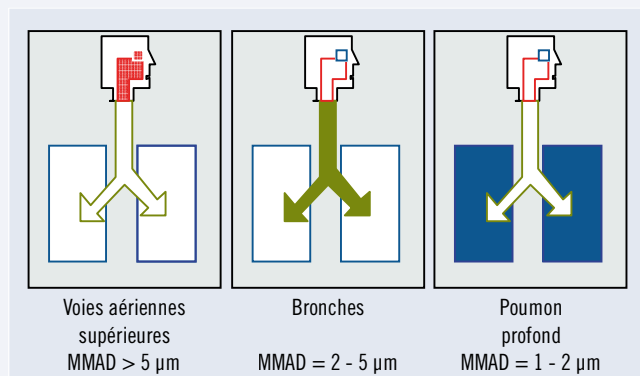


Référence Aérosolthérapie par nébulisation en pneumologie Dr JP Chamuzeau, Dr JF Dessanges

Pour Commander


DESCRIPTION	Référence
NEBULISSEUR SIDESTREAM À PATIENT UNIQUE MASQUE ADULTE, TUBULURE	4446
NEBULISSEUR SIDESTREAM À PATIENT UNIQUE MASQUE ENFANT, TUBULURE	4447
NEBULISSEUR SIDESTREAM À PATIENT UNIQUE EMBOUT BUCCAL ANGULAIRE, TUBULURE	4448
SIDESTREAM À PATIENT UNIQUE	4445
MASQUE ADULTE	1100
MASQUE ENFANT	1120
EMBOUT BUCCAL	1601
TUBULURE (1,8 M)	1020

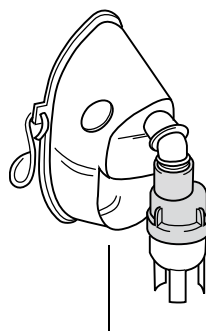

Nébuliseur Sidestream
à patient unique,
masque adulte,
tubulure

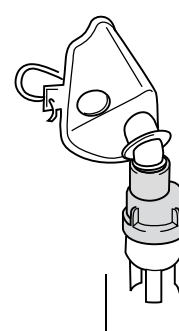

Nébuliseur Sidestream
à patient unique,
masque enfant,
tubulure

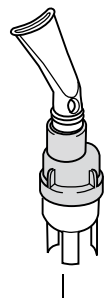

Nébuliseur Sidestream
à patient unique, embout
buccal angulaire,
tubulure

Contact :



7 et 9 rue des Cordeliers 80000 AMIENS
Tel 03 22 72 55 24 Fax 03 22 72 17 35
www.realme.fr

RESPIRONICS®

Envisioning tomorrow. Improving today.™

Respironics (UK) Ltd

Chichester Business Park, City Fields Way
Tangmere, Chichester, West Sussex PO20 2FT UK
UK Tel: 0800 1300 845 Fax: 0800 1300 846

Respironics Customer Services

International Tel: +1 724 387 4000 Fax: +1 724 387 5012
International Email: globalcustomerservice@respironics.com

www.respironics.com

© Respironics (UK) Limited TOUS DROITS RÉSERVÉS

SideStream est une marque déposée de Respironics, Inc. et ses filiales.

1003808 10/07 Issue 2 bdc 9773