

seca 207

Félicitations !

En achetant la toise de mesure seca 207, vous avez acquis un appareil de mesure pour les nourrissons à la fois précis et robuste. La toise de mesure permet tant de mesurer la taille d'un nouveau-né à la naissance que de la contrôler au cours de la croissance. Elle est fabriquée en profilé aluminium rigide et ne requiert aucun entretien.

Les languettes de mesure coulissantes en plastique peuvent être rabattues pour permettre un rangement pratique de la règle graduée. Des vis et une pièce d'écartement fournies permettent de fixer la règle au mur.

La règle graduée peut ainsi être installée verticalement au-dessus d'une table de soins pour faire office de dispositif de mesure fixe. La règle graduée seca 207 est destinée principalement aux hôpitaux et cabinets médicaux.

Sécurité

Avant d'utiliser la nouvelle toise de mesure, prenez le temps de lire les consignes de sécurité suivantes.

- Veuillez respecter les instructions du mode d'emploi.
- Ne laissez jamais le nourrisson sans surveillance sur la toise de mesure afin d'éviter tout danger.
- N'effectuez la mesure que sur des surfaces desquelles le nourrisson ne peut tomber.
- Veillez à ce que la toise de mesure et le pèse-bébé soient régulièrement nettoyés et désinfectés, afin d'éviter toute transmission de maladie contagieuse.

- Pour effectuer la mesure exacte de la taille, l'aide d'une deuxième personne est recommandée.

Utilisation



Comment mesurer correctement :

1. Poser le nourrisson sur une surface plane. Poser la toise en poussant le curseur (1) sur la tête du nourrisson.
2. Avec la main droite, faire glisser le curseur (2) en direction des pieds du nourrisson. Maintenir le nourrisson en place avec la main gauche.
3. Tendre les jambes en poussant délicatement sur les genoux du nourrisson avec la main gauche.
4. Avec la main droite, pousser le curseur (2) contre la plante des pieds du nourrisson.

5. Lire la taille sur la graduation sur le côté interne de la toise de mesure (3). En respectant les étapes ci-dessus, on obtient une précision de mesure d'environ ± 10 mm.

Fixer la rallonge de languette métrique...

- Vous avez la possibilité d'agrandir la surface de contact de la tête.
- Appuyer la rallonge à partir du haut sur la languette métrique jusqu'au déclic. La rallonge se déplace sans effort sur la languette métrique.

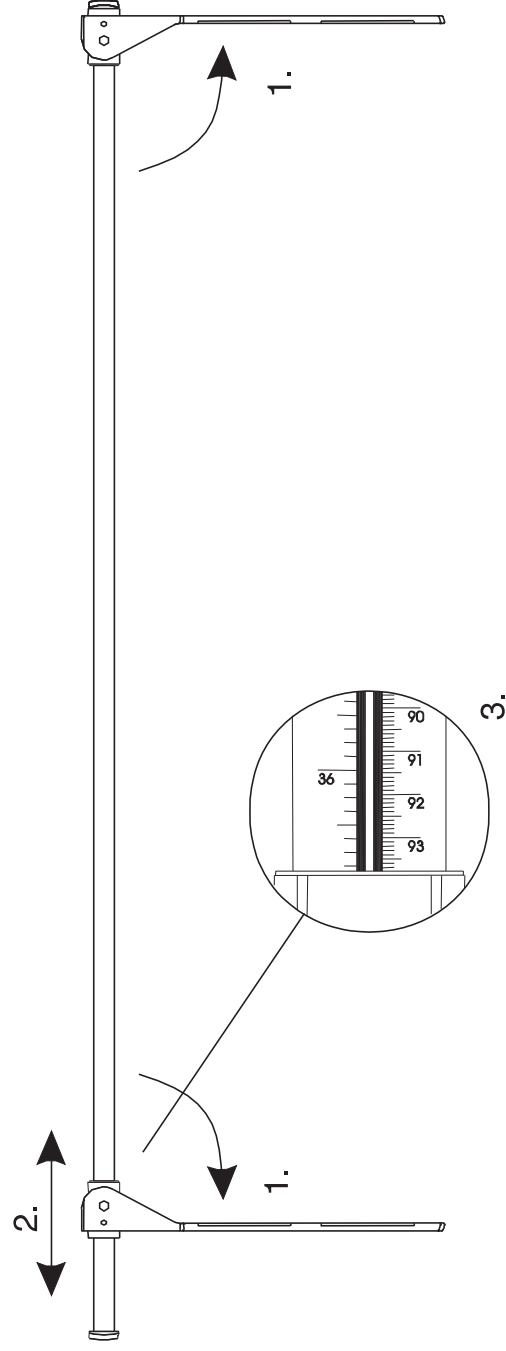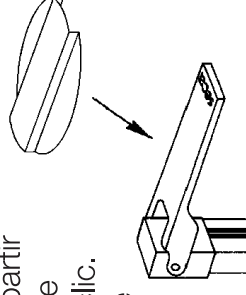

Nettoyage

Nettoyez la toise de mesure si nécessaire avec un nettoyant ménager ou un désinfectant courant. Veuillez respecter les instructions du fabricant.

Données techniques

Plage de mesure: 0-990 mm /
0-39 pouces
Graduation: 1 mm / 1/8 pouce
Précision: supérieure à ± 10 mm
Dimensions (L x H x Pr.): 55 mm x 1050 mm x 34 mm
Poids: environ 700 g
Limites de température: +10 °C à +40°C
Produit médical en vertu de la directive 93/42/CEE: Classe I avec fonction de mesure

Elimination

Si la toise de mesure ne peut plus être utilisée, l'organisme d'enlèvement des déchets pourra vous renseigner sur les mesures nécessaires à prendre pour une élimination appropriée.

Garantie

Une garantie de deux ans à compter de la date de livraison est accordée pour les défauts de matière et de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas aux pièces amovibles, telles que les batteries, les câbles, les adaptateurs secteur, les accumulateurs etc. Les défauts couverts par la garantie sont réparés gratuitement sur présentation de la quittance d'achat par le client. Aucune autre demande de réparation ne peut être prise en compte. Les frais de transport sont à la charge du client si l'appareil n'est pas installé à la même adresse que celle du client. En cas d'endommagements dus au transport, le cas de garantie peut être invoqué uniquement si l'emballage d'origine complet a été utilisé pour les transports et si la marchandise a été immobilisée et fixée conformément à l'emballage initial. Tous les éléments de l'emballage doivent par conséquent être conservés.

Aucun cas de garantie ne peut être invoqué si l'appareil est ouvert par des personnes qui ne sont pas explicitement autorisées par seca.

Nous prions nos clients à l'étranger de bien vouloir contacter directement le revendeur de leur pays respectif pour les cas de garantie.

Certificat de conformité CE

Appareil de mesure à fonctionnement mécanique

Modèle seca 207

Lot n°: voir au dos de la toise de mesure

La toise de mesure satisfait aux exigences de la directive 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux.

seca gmbh & co. kg.


Sönke Vogel

– Geschäftsführer Finanzen & Technik –

Hamburg

: www.seca.com

