

**REALME**

[www.realme.fr](http://www.realme.fr)

# DUO

Quick Start Guide

**Eko**

## 1. Téléchargez l'application Eko

### Application Eko

Téléchargez l'application Eko sur votre appareil mobile à l'aide de ce QR code ou cherchez « Eko App » sur App Store Apple ou Google Play Store.

Il est important que l'application Eko soit prête pour réaliser la configuration de votre DUO.



Flashez avec l'appareil photo de votre téléphone pour télécharger l'application Eko

Vous bénéficiez d'un accès immédiat à des visualisations en temps réel, des fonctions d'enregistrement, des mises à jour de sécurité et sur les produits importantes et même des analyses d'IA.\*




*\*Peut nécessiter un abonnement*

## 2. Configuration du DUO

### Chargement de l'appareil

Branchez le tapis de charge sans fil dans une prise à l'aide du câble micro-USB et de l'adaptateur mural fournis. Placez DUO sur le tapis de charge sans fil.

**Les voyants autour du bouton central s'allument pour indiquer que DUO est en charge et bien positionné.** Un voyant orange apparaît également sur le tapis de charge dans fil. Les voyants sur DUO s'éteignent lorsqu'il est complètement chargé.

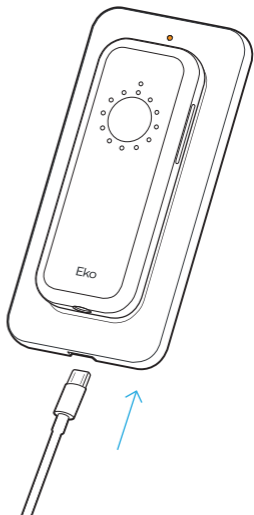

## Schémas d'allumage des voyants DUO



DUO activé, clignotant.  
En mode couplage.



DUO activé.  
Couplé avec  
le dispositif.



DUO activé.  
20 % de batterie.



DUO activé, clignotant.  
10 % de batterie.



DUO en charge.  
Les voyants entourent  
le bouton.



DUO complètement  
chargé.  
Voyants éteints.

### 3. Installez les écouteurs de DUO

#### Lecture audio

Si vous avez acheté des écouteurs Eko, insérez le connecteur dans la prise jack audio et faites-le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le fixer.

DUO peut également être utilisé avec la plupart des casques filaires de 3,5 mm.




## 4. Mise sous et hors tension

### Mise sous et hors tension de DUO

Pour la mise sous tension, appuyez pendant 1 seconde sur le bouton central, puis relâchez-le. Les voyants clignotent.


Une fois le couplage avec l'application Eko réalisé, le voyant reste allumé.

Pour la mise hors tension, appuyez pendant 2 secondes sur le bouton, puis relâchez-le. Les voyants s'éteignent.

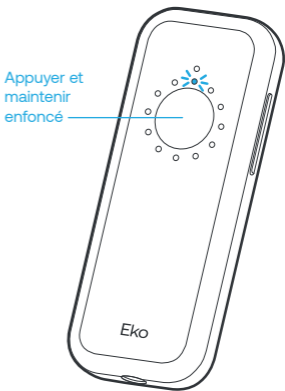


## Sons + ECG

DUO est équipé d'une membrane de stéthoscope numérique et de 2 électrodes d'ECG.

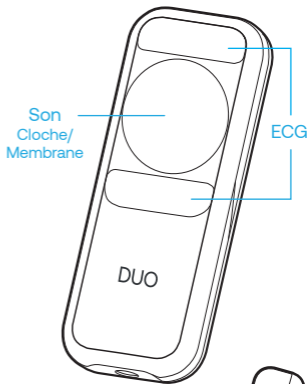

## Commande de volume

Cliquez sur le bouton latéral pour ajuster l'amplification des sons corporels dans l'écouteur.

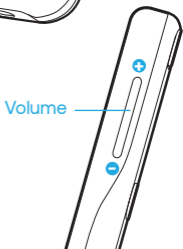

## 5. Réglage des filtres audio

### Remplacement du filtre audio

DUO compte 4 filtres audio différents. Vous pouvez changer de filtre audio en cliquant trois fois sur le bouton central.



Membrane  
(cardiaque)



Cloche



Plage moyenne  
(pulmonaire)



Étendu


## 6. Capture d'un signal ECG de qualité

### Positionnement

DUO transmet un ECG à un seul fil. Le meilleur positionnement peut varier.

Les électrodes d'ECG doivent être placées sur la peau.

DUO permet également d'ausculter sur toutes les positions anatomiques.

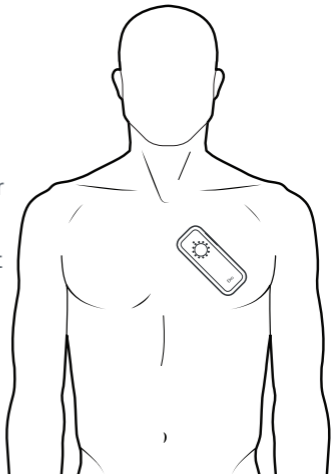


## 7. Capture de sons de qualité

### Sons du cœur et des poumons


#### Positionnement

Ces points indiquent les positions généralement acceptées pour écouter le cœur (avant) et les poumons (arrière) avec DUO. DUO est sensible aux vibrations et au bruit des mains. Vous devez appliquer une pression ferme et constante contre le corps pour garantir un bon contact.

Avant

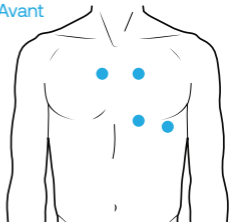

Arrière

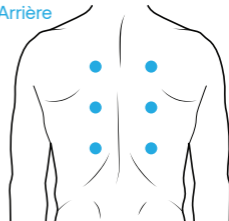

Please see the full  
Instructions for Use at  
[support.ekohealth.com/DUO](https://support.ekohealth.com/DUO)  
or contact us at  
[support@ekohealth.com](mailto:support@ekohealth.com)



0537



Eko Devices, Inc.  
1212 Broadway, Suite 100  
Oakland, CA 94612 USA

# Eko

TM and ©2021 Eko Devices Inc.  
LBL 210 Rev B - November, 2021



Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands