

STOP
jusqu'à
10
Jours

Bactéries
Champignons
certains Virus

Bacoban^{DL}

prêt à l'emploi

Nettoyant désinfectant pour les surfaces, les matériels et dispositifs médicaux

(conformément à la directive 93/42/CEE; MDD)



BACOBAN est en vente en :

Contenance	Conditionnement	Référence
Flacon de 500ml	8/carton	BACDL500
Paquet de 50 lingettes	16/carton	BACDLTUE

Indications

Produit de désinfection prêt à l'emploi, à efficacité longue durée. Sans Aldéhyde, sans Phénol.

Domaines d'application

Pour la désinfection et le nettoyage des surfaces médicales conformément à la directive 93 / 42 / CEE et de toutes autres surfaces présentes dans les hôpitaux, les cabinets médicaux, les centres de rééducation, les maisons de retraites.

En particulier dans les domaines où une hygiène stricte est nécessaire tels que les salles blanches, les urgences, les services de réanimation...

Bacoban[®] DL peut également être utilisé dans les domaines pharmaceutiques et cosmétiques.

Efficacité microbiologique

Bacoban[®] DL est actif sur les bactéries, les champignons, les virus (Hépatite B et C, HIV, grippe, H5N1, Rotavirus et Adénovirus).

Composition

100 g de solution contiennent :
0,26 g de Chlorure de Benzalkonium, 0,025 g de Pyrithion de sodium, des polycondensateurs, des substances odorantes, de l'eau purifiée.

Bacoban^{DL}

prêt à l'emploi

Efficacité microbiologiques

DIN EN 1040 (bactéricide)	5 min.
DIN EN 1275 (fongicide)	5 min.
DIN EN 1276 (bactéricide)	5 min.
DIN EN 1650	5 min.
DIN EN 13697	5 min.

Efficacité antimicrobienne longue durée jusqu'à 10 jours prouvée par le test ASTM E 2180

Actif sur les virus HIV-I, HBV, HCV, Herpès, grippe, BVDV, Vaccine, Rotavirus... (efficacité virucide selon l'Association Allemande contre les maladies virales; 5 min)

Instructions d'utilisation

Solution sans alcool prête à l'emploi. Pour garantir une désinfection effective, répartir uniformément le liquide sur la surface à l'aide d'un chiffon et laisser sécher, ne pas rincer. Ne pas mélanger à d'autres nettoyants ou d'autres désinfectants.

En cas de mauvaise utilisation (trop de produit utilisé), une pellicule fine peut apparaître après séchage. Cette pellicule se retire facilement en utilisant des nettoyants acides ou alcalins.

Peut être utilisé sur toutes les surfaces. En cas de doute, nous recommandons de tester BACOBAN DL sur une petite surface discrète. A conserver uniquement dans le flacon fermé. Garder à l'abri du froid et dans un endroit sec.

Jeter une fois le bidon vidé de son contenu au recyclage. Ne pas utiliser après la date de péremption.

Instructions de sécurité

Porter des vêtements de protection adéquates. En cas de contact avec la peau, rincer immédiatement à grande eau. Ne pas avaler. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à grande eau et consulter un médecin. Garder hors de portée des enfants.

Important !

L'effet antimicrobien longue durée de Bacoban[®] DL ne doit pas conduire à négliger les mesures nécessaires de désinfection en cas de contaminations visibles et/ou éventuelles.

**Les désinfectants s'utilisent avec prudence.
Lire les informations et caractéristiques avant usage.**

UBA-N°: 5704 0031
Biocid Reg.N°: N- 34071

REALME matériel médical
Tel 03 22 72 55 24
Fax 03 22 72 17 35
contact@realme.fr 1 rue des violettes 80 480 SALEUX

